

SILKPEEL® /DermoLissage™ Declogging Instruktion

1. Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret til forsyningsvæsken og afmonter den blå tilførsels-slange.
2. Fyld et rent glas med OptiCide3 desinfektionsvæske eller demineraliseret vand. Fastgør den IKKE til maskinen.
3. Tag plastikhætten og behandlingshoved af håndstykket og placer håndstykket i beholderen med OptiCide eller demineraliseret vand. Stil beholderen et sikkert sted.
4. Tilslut injektionssprøjte til forgreningsrøret hvor den blå tilførselslange blev afmonteret
5. Tænd maskinen og drej begge knapper til max. Brug injektionssprøjten ved at trække stemplet frem og tilbage for at lede OptiCide3 gennem slangerne. Efter at have pumpet flere gange, træk da stemplet langsomt tilbage og hold indtil et konstant flow af OptiCide3 løber ned i sprøjten. Det kan tage et stykke tid før desinfektionsvæsken løber gennem enheden. BEMÆRK: Fjern ikke stemplet helt fra sprøjten.
6. Tjek for partikler i sprøjten, afmonter injektionssprøjte fra slangen og smid indholdet ud.
7. Gentag om nødvendigt.
8. Test af korrekt flow
 - Tilslut blå tilførselslange til forsyningsenheden og tilslut en flaske OptiCide3 desinfektionsvæske
 - Sæt affaldsbeholderen på igen, dæk håndstykket med den blå renehætte
 - Juster vakuüm til 6 og flow til 20
 - Vend håndstykket mod loftet for at få væsken til at løbe ud af den blå hætte
 - Drej håndstykket mod gulvet og tæl hvor lang tid det tager for at den blå hætte bliver fyldt med solution. Hvis det tager 5-6 sek. Er tilstopningen væk. Hvis det tager længere er der stadig en tilstopning og proceduren gentages.



Trin 1



Trin 2



Trin 3



Trin 5



Trin 5&6



Trin 8



SILKPEEL® /DermoLissage™
Declogging Instruktion